

MicroBioLogics

ESTUDIOS CON ÉNFASIS EN EL TRANSPORTE

La MicroBioLogics ha conducido estudios para determinar el espacio de tiempo y que condición del transporte deben prevalecer para que las especificaciones y el funcionamiento estén mantenidos para LYFO DISK® y KWIK-STIK, y para los Preparados Ensayados de Microorganismos para Control.

La verificación se basa en ambas las condiciones de envío, simulado y verdadero. Fueron seleccionadas condiciones que no impondrían los honorarios excesivos para envíos especiales y condiciones de manoseo.

LYFO DISK® Microorganisms KWIK-STIK™ Microorganisms

Llegamos hasta las conclusiones siguientes. Los preparados de microorganismos especificados:

- continúan a satisfacer las especificaciones y el desempeño del producto;
- por un período de catorce (14) días;
- en ausencia de refrigeración o "dispositivos de refrescarse";
- cuando es evitada exposición hacia las extremidades de la temperatura.

Preparados Ensayados de Microorganismo para el Control

Las conclusiones siguientes fueron sacadas. Los preparados ensayados de Microorganismo para el control:

- continúan a satisfacer las especificaciones y el funcionamiento del producto;
- por un período de siete (7) días;
- en ausencia de refrigeración o "dispositivos de refrescarse";
- cuando es evitada exposición hacia las extremidades de la temperatura.

Para proveer un nivel adicional de la garantía de la calidad, la política de envío de la MicroBioLogics es la de enviar estos productos para llegar hasta su destinación dentro de cinco (5) días. También, la parte exterior de cada envase de envío está identificada con notación "REFRESCAR DESPUÉS DE LA LLEGADA", para asegurar el manoseo y el almacenaje apropiados en el acto de la recepción.

La MicroBioLogics no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, ni asumir cualquier responsabilidad en conexión con las condiciones del transporte y de las formas de almacenaje, que puedan ocurrir o estar fuera del control de la MicroBioLogics.